




肌に優しい保護ベルト

(商品番号 B-201・B-301)

SINCE 1983
株式会社 看護用品研究所

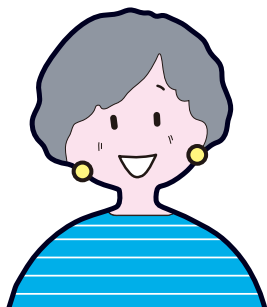

《取り扱い説明書》



【ご使用にあたってのお願い】

- ① 当製品は自傷行為や点滴外し等を防ぐことを目的として、手首や足首に使用するベルトです。
- ② ご使用にあたっては医師や専門家の適切な指示を受け、正しい装着方法でご使用ください。

【特長】

- ① 自ら身体を傷つけたり、治療時の点滴を外したりする危険行為を防ぐためにお使いください。
- ② 肌に接する部分には吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使い、ムレや汗ベタを防ぎます。
- ③ 洗濯はぬるま湯（60℃位まで）で行ってください。

【材質表示】


- ◇ キルト生地：綿35% ポリエステル65%
- ◇ バイアステープ：綿35% ポリエステル65%
- ◇ マジックテープ：ポリエステル100%
- ◇ サラクールメッシュ（肌側）
- ◇ アクリル不織布（通気層）

【規格】

- ◇ Mサイズ (B-201)
長さ／190cm 幅／5～10cm
- ◇ Lサイズ (B-301)
長さ／300cm 幅／5～10cm


【価格】

- ◇ Mサイズ **3,200**円（税別）
[JANコード：4560182841052]
- ◇ Lサイズ **4,200**円（税別）
[JANコード：4560182841069]

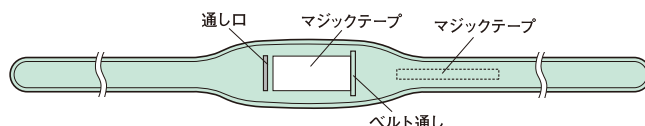


＜ご使用方法＞

1. 帯の先端を通し口に通す。

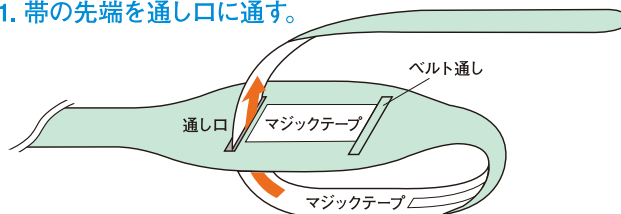

2. 足首(手首)のサイズに調整して、ベルト通しに通す。

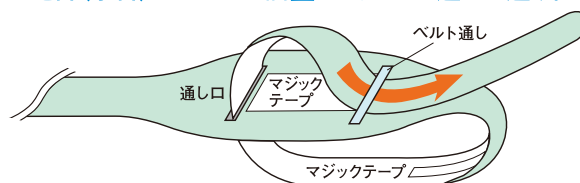

製造元 株式会社 看護用品研究所 〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-26-16

お問い合わせ TEL (048) 976-8821 (代表) FAX (048) 977-6622